

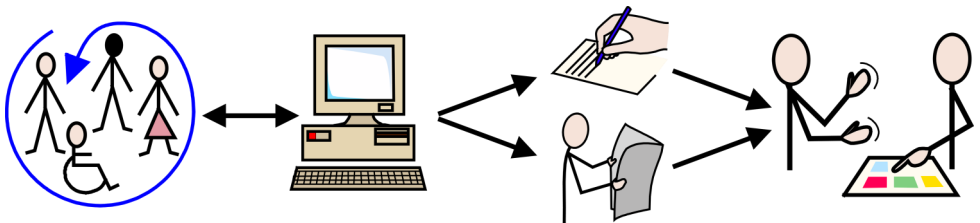


# SuperTalker

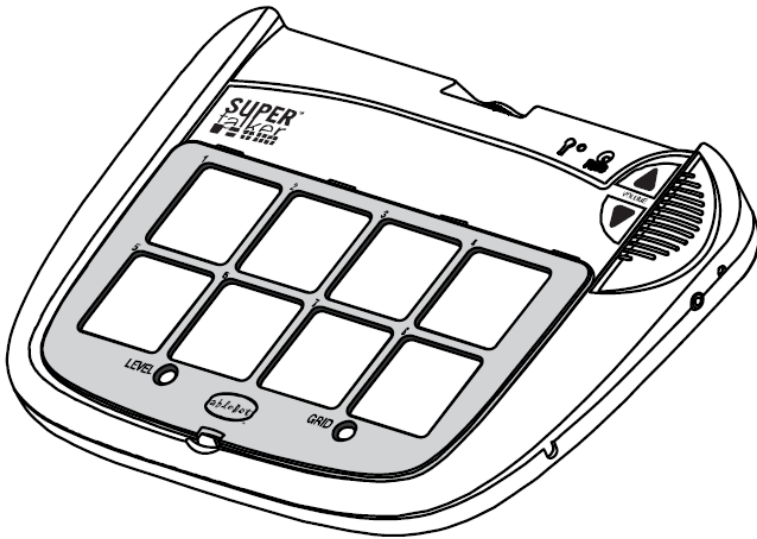

[www.normedia.no](http://www.normedia.no)


## 1. Batteri og på-knapp

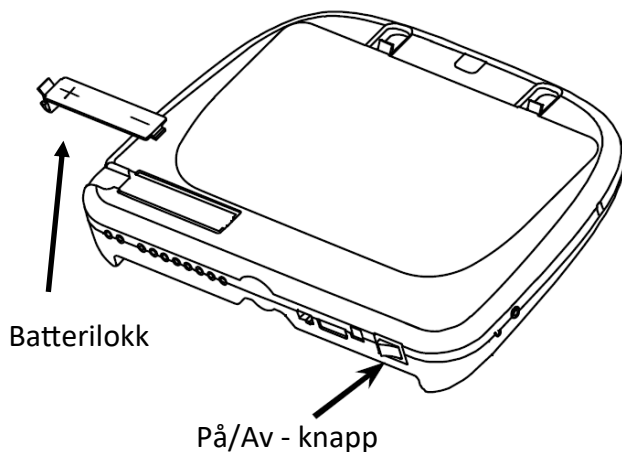

Sett i 4 stk AA batterier som vist på bildet (batterilokk til venstre, med pluss pekende som på tegningen)

På/Av - knappen finner du bak til høyre, om vist på tegningen.

## 2. Velg antall felter og nivå

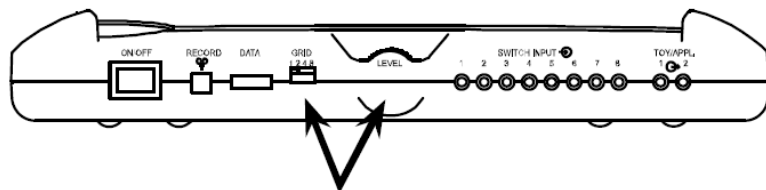


Når du har plassert overlegget og fingerguiden med det antall felter du vil ha:

**Velg Nivå (Level) (1-8) og Felter (Grid) (1, 2, 4, 8)**

Pass på at du velger riktig antall felter i forhold til fingurguiden og overlegget.

Les mer om overlegg og fingerguide senere i veiledningen.

### 3. Gå til opptaksmodus

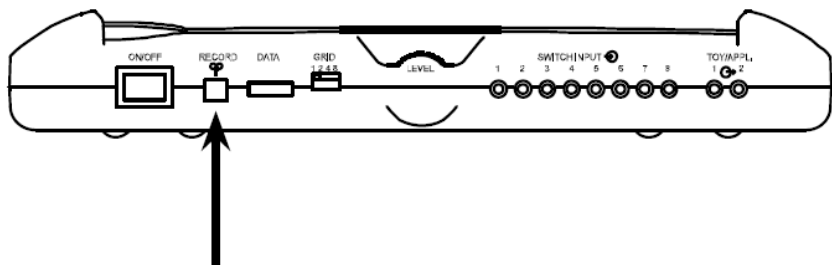


RECORD: Trykk og hold, så slipp

**Trykk og hold RECORD knappen nede til RECORD lyset aktiveres. Slipp knappen.**

### 4. Ta opp en beskjed/melding

Trykk og hold mens du snakker for opp-  
tak i feltet.

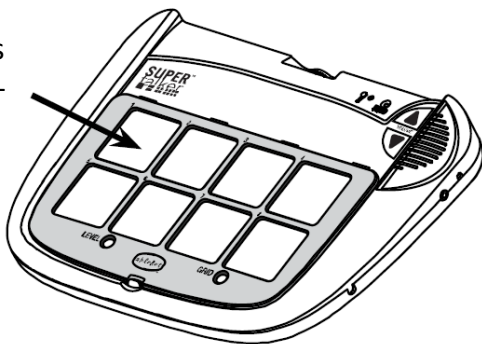


**Trykk og hold inne det feltet du ønsker å ta opp på. Begynn å snakke etter at du har hørt et pip. Slipp når du er ferdig.**

**Gjenta for flere beskjeder/meldinger.**

RECORD lyset vil blinke mens du tar opp.

Snakk nærme mikrofonen for høy og tydelig lyd.

## 5. Avslutt opptaksmodus

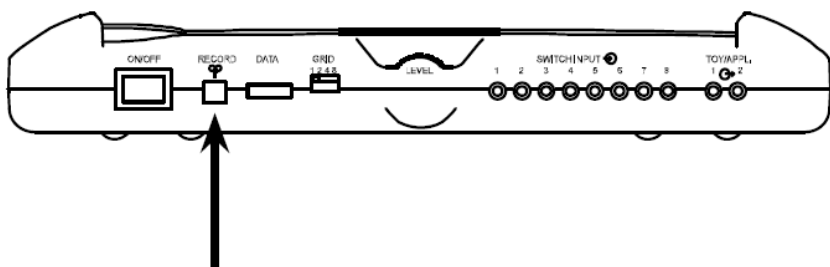

Trykk og slipp RECORD knappen.

**Trykk og slipp RECORD knappen for å avslutte opptaksmodus.**

Enheten har 16 minutters opptak. Når det gjenstår 2 minutter, vil RECORD lyset bli gult.

## Fingerguider og overlegg



### Fingerguider

Supertalker inneholder fingerguider for 1, 2, 4 og 8 felter. Skift finger-guide ved å trekke utløserknappen mot deg (nederst midt på finger-guiden), og løft opp fingerguiden.


### Finger-guide oppbevaring

På baksiden av SuperTalker er det plass til de tre fingerguidene du ikke bruker, samt noen overlegg.

### Overlegg og maler


Se [www.normedia.no](http://www.normedia.no) for oversikt over maler. Ta kontakt om du mangler mal til et spesifikt program.

## Avanserte funksjoner

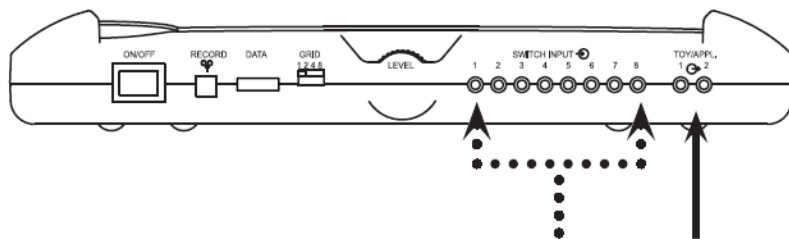

Inngang for brytere  
(direkte styring av felter)

Utgang til bryter-  
styrt utstyr

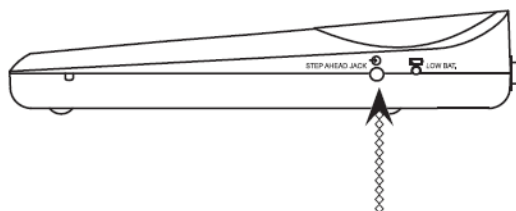

Bryterinngang for sekvens

### Avspilling med eksterne brytere

Koble til en bryter med 3.5mm jackplugg i port 1-8 (tilsvarende feltene). Ta opp som tidligere, og avspill ved å trykke på bryterne. Bryterne er lenket til lokasjon 1-8, venstre til høyre, avhengig av hvilken fingerguide som er på.

### Bruk av bryterstyrt utstyr

Koble til bryterstyrt utstyr i porten TOY/APPL. (3,5mm jack). Den tilkoblede enheten er aktiv i like lenger som den innspilte beskjeden. Portene er lenket til de to første feltene (1 og 2)

### Bryterinngang for sekvens

Denne porten gjør det mulig å spille av feltene i rekkefølge (1 til 8). Antallet beskjeder avhenger av hvilken fingerguide som er valgt.

## Tips

### **Opptak**

Dersom det er inaktivitet i 20 sekunder under opptak, vil SuperTalker gå ut av opptaksmodus.

Fjern alt innhold: Hold RECORD inne i 10 sekunder.

### **Avspilling**

Dersom det er feil fingerguiden ikke passer med valgte antall felter, vil det avspilles feil beskjeder.

Om du trykker på et felt som ikke inneholder noen beskjed, vil RECORD lyset blinke gult.

### **Volum**

For å låse volumet, se pilene på neste side for Volum lås. Trykk på feltene samtidig.

**For monteringsløsninger, ta kontakt.**

## Garanti og feilsøking

### **Garanti**

Ablenet tilbyr en begrenset to års garanti på SuperTalker. Mer detaljer om garantien finnes på [www.ablenet.com](http://www.ablenet.com).

For service kontakt NorMedia AS. [www.normedia.no](http://www.normedia.no)

### **Feilsøking**


Om det ikke spilles av noen beskjeder: Sjekk batteriet.

Om du ikke får startet opptaksmodus: Sjekk bateriet.


Om bryterinnangene ikke fungerer, test bryteren på annet utstyr.

# Oversikt over SuperTalker


## Topp

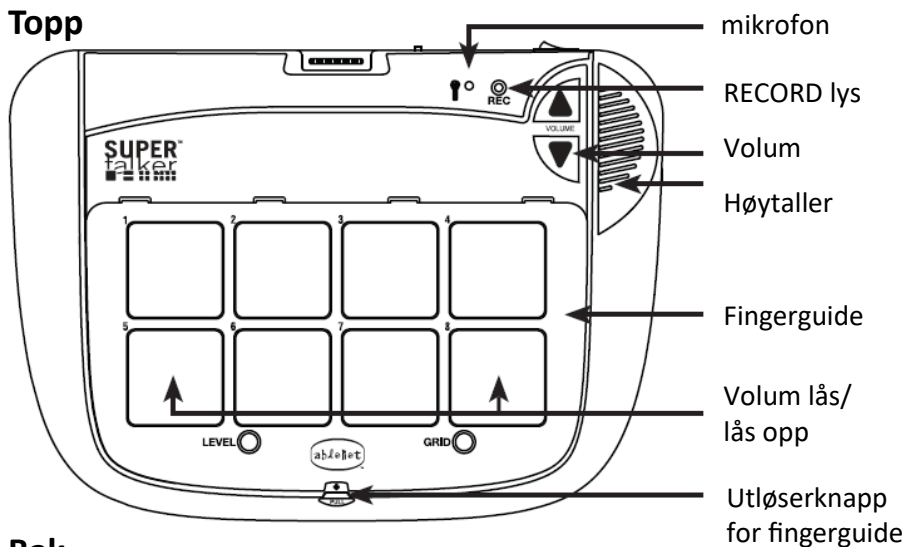

## Bak

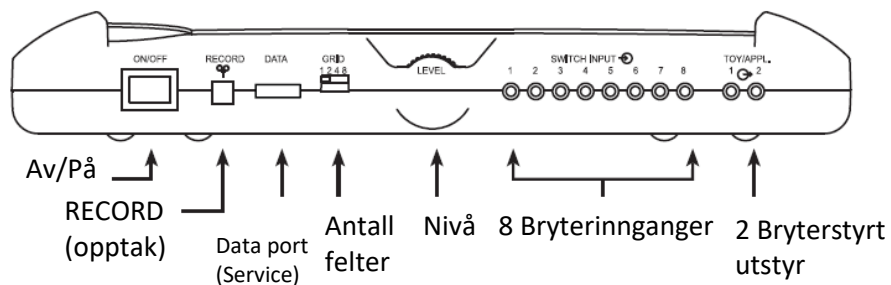

## Under

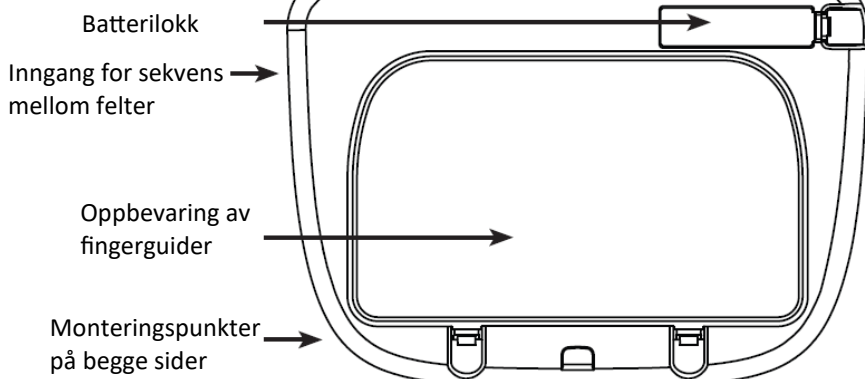



[www.normedia.no](http://www.normedia.no)